

**Informátor Oddělení klinické biochemie FNOL**  
**č. 3/ 2019**

**Změna odběrových zkumavek a metody stanovení okultního krvácení ve stolici (FOB)**

Dle sdělení dodavatele dochází k inovaci odběrových zkumavek a vyšetřovací soupravy pro stanovení okultního krvácení ve stolici, jejímž cílem je zejména prodloužení stability vzorku před vyšetřením. Nové varianty nejsou kompatibilní s původními produkty, a proto **jsme nuceni ke dni 18. 4. 2019 ukončit příjem dosud používaných odběrových zkumavek.**

Původní zkumavky, které do tohoto data nestihnete spotřebovat, Vám ochotně vyměníme za nové. Do této doby budeme přijímat oba typy zkumavek. Nové zkumavky je již možné fasovat na OKB.

**Stabilita vzorku v inovované zkumavce:**

18-25 °C 5 dní (namísto 24 hod)

2-8 °C 7 dní (namísto 5 dní)

Vzorky lze zasílat potrubní poštou.

Původní zkumavka

Inovovaná zkumavka



Děkujeme za pochopení.

Vypracoval:

RNDr. Markéta Plchová  
RNDr. Markéta Lenhartová

Schválil:

RNDr. J. Prošková